



ЦИТОЩЕТКА СО ШПАТЕЛЕМ



Зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем

Описание: инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки: цитощетка и шпатель. Шпатель выполнен в виде плоской лопатки с закругленными краями. Рабочая часть инструмента с цитощеткой используется для забора материала из цервикального канала, рабочая часть в виде шпателя удобна для забора материала (мазок или соскоб) с поверхности шейки матки или со слизистой влагалища.

Две насадки позволяют **одним инструментом** выполнить забор материала с **двух участков** слизистой (влагалище и шейка матки).

Показания: забор материала для бактериологических и цитологических исследований.

Применять зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем необходимо непосредственно после извлечения из упаковки.

Методика применения: забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

1. Вскрыть потребительскую упаковку и извлечь инструмент.
2. Слегка прижав шпатель к слизистой, выполнить несколько оборотов на 360°.

3. Затем ввести в цервикальный канал цитощетку и однократно повернуть инструмент на 180°.

4. Собранный на рабочих частях инструмента материал перенести на предметное стекло или в транспортную среду.

5. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург»,
210023, Беларусь, Витебск, пр-т Людникова 13,
тел/факс: +375 (212) 24 32 33,
e-mail: market@simurg.by; www.simurg.by
190121, Россия, С.-Петербург,
Английский пр-т, 3,
тел: +7 (812) 331 83 70,
e-mail: office@mp-simurg.ru

